

TABLEAU DE CUISSON

| | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Sous-couche | Zircone & « CZR PRESS » | CERABIEN™ ZR (Porcelaine) | CZR LF Basse Fusion (Porcelaine) |
| Temps de séchage (min.) | 5 | 5 | 5 |
| Température de pré-séchage | 500°C | 600°C | 600°C |
| Début du vide | 600°C | - | - |
| Vitesse de montée en température | 45°C | 45°C | 45°C |
| Niveau de vide (kPa) | 96* | - | - |
| Rupture de vide | 750°C | - | - |
| Haute température | 750°C | 910°C | 840°C |
| Stabilisation en atmosphère (min.) | 1 | 0 | 0 |
| Temps de refroidissement (min.) | 4 | 4 | 4 |

La température de cuisson varie en fonction du type de produit utilisé comme sous-couche. * 96kPa=72cmHg

Les couleurs indiquées dans cette brochure peuvent être légèrement différentes de celles du produit réel. Avant d'utiliser ce produit, n'oubliez pas de lire l'IFU (Mode d'emploi) fourni avec le produit. Les spécifications et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Emmanuel Bourdageau

(région Nord)
07 88 69 35 17

emmanuel.bourdageau@kuraray.com

Vanessa Barré

(région Nord Ouest)
06 76 07 60 09

vanessa.barre@kuraray.com

Christophe Commaux

(région Sud Est)
06 80 59 25 53

christophe.commaux@kuraray.com

Cristele Da Costa

(région Ile-de-France)
06 83 95 66 11

cristele.dacosta@kuraray.com

Dominique Terracol

(région Rhône-Alpes Auvergne)
07 88 39 16 98

dominique.terracol@kuraray.com

Brenda van de Watering

(pour les autres régions)
06 84 34 68 87

brenda.vandewatering@kuraray.com

Kuraray Noritake France, 3 Avenue de la Division Leclerc, 92160 Antony- France

Tél. : +33 (0)1 56 45 12 51 **E-Mail** dental-fr@kuraray.com **Site Internet** www.kuraraynoritake.eu

Cerabien ZR FC Paste Stain sont des dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Ils sont non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement la notice avant son utilisation. Indication : Maquillage et glaçage des prothèses dentaires. Fabricant: Kuraray Noritake Dental. Classe IIa. CE 0120. Novembre 2018

kuraray

Noritake

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain

Pour toutes restaurations en zircone stratifiée ou monolithique



CERABIEN™ ZR FC PASTE STAIN

Une pâte de type external stain qui convient à une large gamme d'applications cliniques, avec 27 teintes.

Translucidité

| | | |
|--|------------------|-------------|
| | GLAZE (5G) | #104-5851EU |
| | CLEAR GLAZE (5G) | #104-5861EU |

Email

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| | LIGHT GRAY (3G) | #104-5611EU |
| | DARK GRAY (3G) | #104-5621EU |
| | GRAYISH BLUE (3G) | #104-5631EU |
| | BLUE (3G) | #104-5641EU |

Dentine

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| | CERVICAL 1 (3G) | #104-5701EU |
| | CERVICAL 2 (3G) | #104-5711EU |
| | CERVICAL 3 (3G) | #104-5721EU |
| | A+ (3G) | #104-5781EU |
| | B+ (3G) | #104-5791EU |
| | C+ (3G) | #104-5801EU |
| | D+ (3G) | #104-5811EU |

Renforcement

| | | |
|--|-----------------------|-------------|
| | WHITE (3G) | #104-5821EU |
| | MAMELON ORANGE 1 (3G) | #104-5681EU |
| | MAMELON ORANGE 2 (3G) | #104-5691EU |
| | EARTH BROWN (3G) | #104-5731EU |
| | REDDISH BROWN (3G) | #104-5741EU |

Ajustement

| | | |
|--|------------------|-------------|
| | VALUE (3G) | #104-5831EU |
| | BLACK (3G) | #104-5601EU |
| | GREEN 1 (3G) | #104-5651EU |
| | GREEN 2 (3G) | #104-5661EU |
| | YELLOW (3G) | #104-5671EU |
| | SALMON PINK (3G) | #104-5751EU |
| | PINK (3G) | #104-5761EU |
| | RED (3G) | #104-5771EU |
| | FLUORO (3G) | #104-5841EU |

| | |
|-------------------|-------------|
| COLOR GUIDE | #211-1179EU |
| ES LIQUID (10 ml) | #126-0091EU |

FC PASTE STAIN FULL KIT #104-5590EU

Contenu : Pots de 5g : Glaze - Clear Glaze, -Pots de 3 g : Light Gray - Dark Gray - Grayish Blue - Blue - Cervical 1 - Cervical 2 - Cervical 3 - A+ B+ C+ D+ White - Mamelon Orange 1 - Mamelon Orange 2 - Earth Brown - Reddish Brown - Value - Black - Green 1 - Green 2 - Yellow - Salmon Pink - Pink - Red - Fluoro, Color guide et ES Liquid

FC PASTE STAIN BASIC KIT #104-5870EU

Contenu : Clear Glaze - Dark Grey - Grayish Blue - Cervical 2 - A+ - White - Earth Brown - Salmon Pink (Pots de 3 g) – Color guide et ES Liquid (10 ml)

Finition avec CERABIEN™ ZR FC Paste Stain*



1 Créez une structure de surface sur toute la couronne sous l'eau courante ou dans des conditions humides.



2 Polissez les pièces qui entrent en contact avec l'antagoniste* (complétez la couronne lors du polissage si la finition consiste uniquement en un polissage).



3 Sablez la surface de la couronne et l'intérieur avec de l'oxyde d'aluminium, à l'exception des parties polies (50-70 µm, 0,2 MPa).



4 Nettoyez le dispositif à l'aide d'un nettoyeur à ultrasons à l'alcool ou à l'acétone, ou utilisez un nettoyeur à vapeur.



5 Fixez le dispositif à une broche standard ou métallique.



6 Appliquez la glaçure et cuisez au four.

* Pour la procédure détaillée, consulter le mode d'emploi