



POLIR AVEC CLEARFIL™

TWIST™ DIA pour composite

Un brillant naturel en 2 étape pour les composites

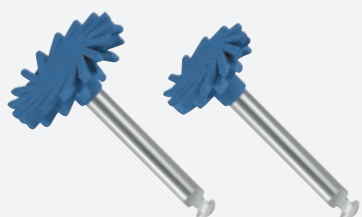

● **MOYEN**
PRÉ POLISSOIR

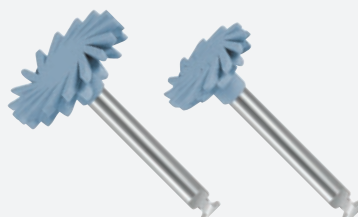

● **FIN**
POLISSOIR HAUTE BRILLANCE


LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE DE CRÉER UN BRILLANT NATUREL

Les polissoirs CLEARFIL™ Twist Dia sont indiqués pour tous les composites. Le “pré-polissoir” crée la forme finale depuis tous les angles imaginables. Avec le “polissoir haute brillance”, vous pouvez finaliser avec un brillant élevé et naturel en quelques secondes. Le CLEARFIL™ Twist Dia est autoclavable et donc réutilisable. La combinaison entre des composants flexibles et des particules de diamant vous donne un résultat haute brillance sans précédent !


AVANTAGES

- Procédure simple grâce à 2 polissoirs
 - Un pré polissoir pour lisser la structure
 - Un polissoir haute brillance pour une brillance naturelle
- Stérilisable et réutilisable
- 100% diamant, pas de substituts ou de particules abrasives de mauvaise qualité
- Efficacité économique grâce à sa durabilité et réutilisabilité

SCANNER POUR
VOIR LES IFUS

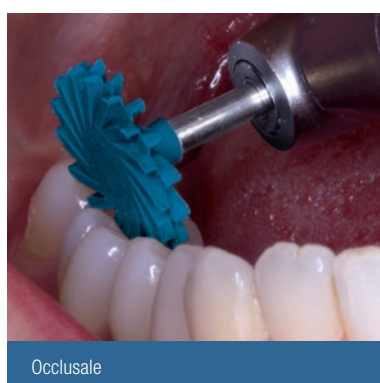

Occlusale

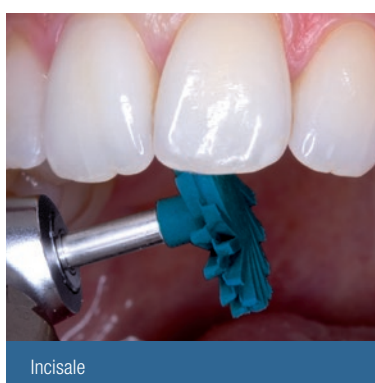

Incisale



Vestibulaire



Vestibulaire



Linguale



Proximale

VITESSE DE ROTATION RECOMMANDÉE ET MAXIMALE

Vitesse recommandée : 3 000 - 8 000 tours/minute pour Medium et Fin

Vitesse maximale : 20 000 tours/minute

TWIST™ DIA pour composite

Système de polissage de composite

#1201-IP 14mm Introductory kit (6pcs)

#1202-IP 14mm Pre-polishing Refill (10pcs)

#1203-IP 14mm High-shine polishing Refill (10pcs)

#1204-IP 14mm Trial (2pcs)

#1211-IP 10mm Introductory kit (6pcs)

#1212-IP 10mm Pre-polishing Refill (10pcs)

#1213-IP 10mm High-shine polishing Refill (10pcs)

#1214-IP 10mm Trial (2pcs)

#1221-IP Pre-polishing combination kit (10pcs)

#1222-IP High-shine polishing combination kit (10pcs)

POLISSEZ LA ZIRCONA AVEC KATANA™ ZIRCONIA TWIST DIA

La forme innovante avec des spirales flexibles offre de nombreux avantages pour le dentiste pour d'excellents résultats. En découvrir davantage sur kuraraynoritake.eu/fr/clearfil-twist-dia

Les spécifications et apparences du produit sont susceptibles de changer sans préavis. Les couleurs imprimées peuvent différer légèrement de la couleur réelle.

Kuraray France, 63 Avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg La Reine
01 56 45 12 53, dental-fr@kuraray.com
kuraraynoritake.eu/fr



04/2021